

IxS - Soporte hinchable para múltiples aplicaciones



El primer cojín inflable de posicionamiento con forma anatómica que sostiene y posiciona las partes del cuerpo durante cualquier procedimiento o examen quirúrgico o médico.

BENEFICIOS



Ajustable
(inflado/
desinflado)



Mejor ergonomía
mediante el
uso de aire



**100%
higiénico**



**Permeable a
los rayos X**

Ejemplo 1:
rectangular con
tira adhesiva



Ejemplo 2:
forma de media luna
con tira adhesiva



Ejemplo 3:
rectangular con tela



Lo que dicen nuestros clientes...

"Levantar al paciente manualmente para ponerle un cojín debajo es demasiado brusco. El cojín inflable proporciona una lordosis muy suave".

- Dr Depauw, neurocirujano, ETZ (Países Bajos)

"En la cirugía aórtica, el tiempo es esencial. El uso del soporte inflable hizo posible el reposicionamiento en sólo unos segundos".


- Dr Heyligers, cirujano vascular, ETZ (Países Bajos)

"El IxS es sencillo y eficaz. El paciente se encuentra estable en la posición rodilla-pecho (Salaam). Deslizar al paciente hacia atrás también es fácil cuando el cojín está inflado".

- Jefe de OK, AZ West (Bélgica)

Ergotrics

INFLATABLES FOR HEALTHCARE

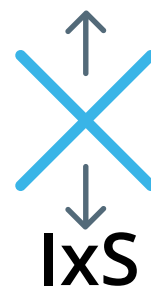

Cojín de posicionamiento inflable para cualquier procedimiento

La colocación correcta del paciente proporciona un acceso óptimo al lugar de la intervención, preservando al mismo tiempo las funciones corporales y la integridad estructural. El uso de aire comprimido en lugar de trabajo manual es un avance ergonómico en el hospital.

¿Solicitar información sobre el
producto o una demostración?

info@ergotrics.com • www.ergotrics.com



DOS FORMAS, DOS TAMAÑOS, TRES VERSIONES.

UNA DOCENA DE VARIACIONES DIFERENTES

El personal médico puede **elegir la forma, el diseño y el tamaño** que mejor se adapte a la forma única del paciente y al procedimiento quirúrgico o médico. Por ejemplo, el IxS está disponible en diferentes tamaños y diseños. También puede elegir un IxS con cinta adhesiva médica (recomendada para procedimientos que requieran mover al paciente) o cubierta absorbente (para procedimientos largos).

Configure el cojín para satisfacer **sus necesidades** exactas. Elige entre:

■ FORMA:



Media luna



o rectangular

■ VERSIÓN:

Tira adhesiva




o


Cubierta absorbente



■ TALLA:

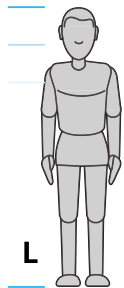

L

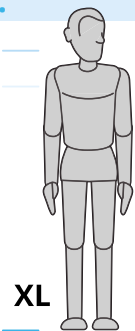

XL

Grande o Extra Grande

FORMA	DIMENSIONES
Rectangular Grande	49 x 22 x 12cm 19.3 x 8.7 x 4.7in
Rectangular Extra Grande	53 x 25 x 14cm 20.9 x 9.8 x 5.5in
Media luna Grande	44,5 x 20,5 x 10cm 17.5 x 8.1 x 3.9in
Media luna Extra Grande	51 x 20,5 x 12cm 20.1 x 8.1 x 4.7in

Síganos en LinkedIn y será **informado inmediatamente de cada lanzamiento** de nuevos formularios:



¿Busca una forma específica?

Háganos saber su idea y aplicación: info@ergotrics.com

Gracias a las diferentes formas y variaciones, las almohadillas IxS proporcionan una **POSICIÓN PERFECTA PARA UNA AMPLIA VENTANA DE PROCEDIMIENTOS:**

■ Nuestra almohadilla en forma de media luna (IxS-S) se utiliza para el procedimiento ALIF.

Antes de la anestesia, pegue el cojín en el lugar correcto de la espalda del paciente. Durante la operación, infle el cojín para crear suavemente la distracción indirecta. Ideal para una lordosis suave.



■ Nuestro cojín rectangular (IxS-R) permite la elevación temporal de la espalda durante la cirugía vascular abierta.

Se coloca al paciente en posición supina en la mesa de operaciones rígida en el híbrido quirófano con la almohada bajo la espalda a la altura de la aorta abdominal. Durante la operación, el cojín puede inflarse y desinflarse a la altura correcta.



■ El IxS ayuda a reducir la lordosis lumbar y facilita el acceso a la columna vertebral.

Tanto para la neuroestimulación como para otras cirugías espinales (mínimamente invasivas), el acceso a la columna vertebral es importante. La ampliación del espacio intervertebral facilita la navegación y permite concentrarse en la tarea.



■ El IxS-R eleva de forma segura el torso del paciente anestesiado sin necesidad de aplicar fuerza manual.

La posición de Salaam o rodilla-pecho es una posición quirúrgica que se utiliza a menudo para la cirugía descompresiva de la columna vertebral. Un posicionamiento eficaz para el procedimiento, que puede realizarse con nuestro IxS sin ninguna carga ergonómica para usted y sus colegas.



■ La aplicación más habitual del IxS es en posición lateral, cuando hay que acceder al corazón, la cadera o los riñones.

La almohadilla en forma de media luna (IxS-S) se coloca bajo la axila o el costado y se infla durante el procedimiento para lograr el objetivo quirúrgico.

