

IxS – Inflatable Support for multiple applications



Het eerste anatomisch gevormde opblaasbare positioneringskussen dat lichaamsdelen ondersteunt en positioneert tijdens eender welke chirurgische of medische procedure of onderzoek.

■ VOORDELEN



Regelbaar
(opblazen/
leeglaten)



**Betere
ergonomie**
door gebruik
van perslucht



**100%
Hygiënisch**




**Röntgen-
doorlaatbaar**

voorbeeld 1:
rechthoekig
met kleefstrook



voorbeeld 2:
sikkelvormig
met kleefstrook

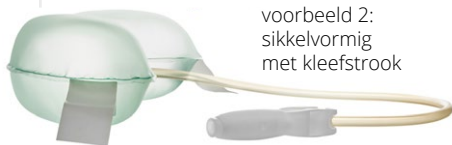

voorbeeld 3:
rechthoekig met doek



Wat onze klanten zeggen...

“De patiënt manueel optillen om er een kussen onder te leggen, is te bruusk. Het opblaasbare kussen zorgt voor een zeer zachte lordose.”

- Dr Depauw, neurochirurg, ETZ (Nederland)

“Bij de aorta ingreep is tijd van essentieel belang. Het gebruik van de opblaasbare steun maakt herpositionering binnen slechts enkele seconden mogelijk.”

- Dr Heyligers, vaatchirurg, ETZ (Nederland)

“De IxS is eenvoudig en effectief. De patiënt ligt stabiel in knie-borst (Salaam) houding. Ook het achteruitschuiven van de patiënt gaat makkelijk als het kussen opgeblazen is.”

- Hoofd OK, AZ West (Belgium)



Ergotrics®

INFLATABLES FOR HEALTHCARE



Opblaasbaar positioneringskussen voor eender welke ingreep of procedure

De juiste positionering van de patiënt biedt optimale toegang tot de plaats van de operatie met behoud van de lichaamsfuncties en structurele integriteit. Het gebruik van perslucht in plaats van handenarbeid is een ergonomische doorbraak in het ziekenhuis.

Product info of demo aanvragen?
info@ergotrics.com • www.ergotrics.com



Twee vormen, twee maten, drie versies.

EEN DOZIJN VERSCHILLENDE VARIATIES

Het medisch personeel kan de **vorm, uitvoering en maat kiezen** die het best past bij de unieke vorm van de patiënt en de chirurgische of medische ingreep. Zo is de IxS verkrijgbaar in verschillende afmetingen en uitvoeringen. U kan ook een IxS kiezen met huidvriendelijke kleefstrook (aanbevolen voor ingrepen waarbij de patiënt verplaatst moet worden) of absorberende doek (voor lange ingrepen).

Stel het kussen samen om precies aan **uw wensen** te voldoen. Kies tussen:

VORM:



Sikkelvormig of Rechthoekig

UITVOERING:


Kleefstrook



of
Absorberend doek



MAAT:

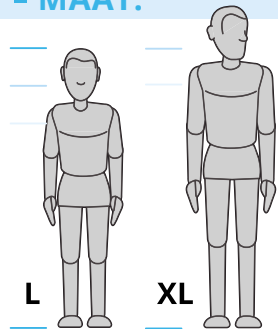

Groot of Extra groot

VORM	DIMENSIES
Rechthoekig Large	49 x 22 x 12cm 19.3 x 8.7 x 4.7in
Rechthoekig Extra Large	53 x 25 x 14cm 20.9 x 9.8 x 5.5in
Sikkel Large	44,5 x 20,5 x 10cm 17.5 x 8.1 x 3.9in
Sikkel Extra Large	51 x 20,5 x 12cm 20.1 x 8.1 x 4.7in

Volg ons op LinkedIn, zo ben je meteen op hoogte van elke lancering van nieuwe vormen:




Zoek je een specifieke vorm?

Laat ons uw idee en toepassing weten: info@ergotrics.com

Dankzij de verschillende vormen en variaties zorgen de IxS-kussens voor **PERFECTE POSITIONERING VOOR EEN BREDE WAAIER VAN PROCEDURES:**


Ons sikkelvormig kussen (IxS-S) wordt gebruikt voor de ALIF procedure.

Vóór de anesthesie plakt u het kussen op de juiste plaats op de rug van de patiënt vast. Tijdens de operatie blaast u het kussen op waardoor u voorzichtig de indirecte distractie creëert. Ideaal voor een zachte lordose.

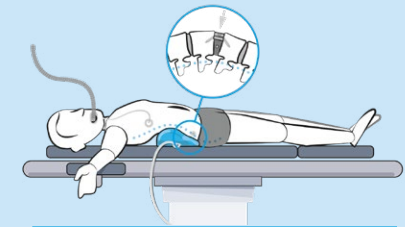


Ons rechthoekig kussen (IxS-R) maakt een tijdelijke rugheffing mogelijk tijdens open vasculaire operaties.

U positioneert de patiënt in rugligging op de starre operatietafel in de hybride operatiekamer met het kussen onder zijn rug ter hoogte van de abdominale aorta. Intra-operatief kan u het kussen opblazen en leeglaten tot de juiste hoogte.

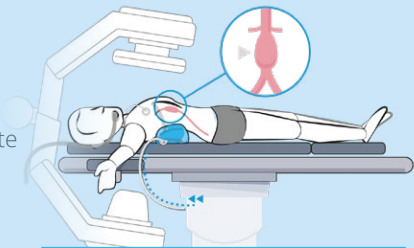

De IxS helpt om de lumbale lordose te verminderen en de toegang tot de spinale ruimte te vergemakkelijken.

Zowel voor neurostimulatie als voor andere (minimaal invasieve) spinale chirurgie is toegang tot de wervelkolom belangrijk. Het verbreden van de tussenwervelruimte vergemakkelijkt de navigatie en stelt u in staat te concentreren op de taak die u moet verrichten.

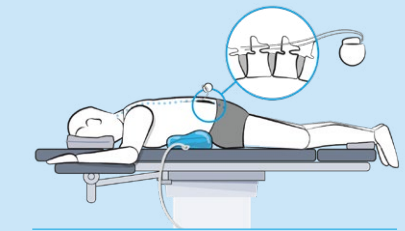

Ons rechthoekig kussen (IxS-R) tilt op een veilige manier het torso van de verdoofde patiënt op zonder manuele kracht.

De Salaam of knie-borst positie is een chirurgische positie die vaak gebruikt wordt voor decompressieve spinale chirurgie. Een effectieve positionering voor de ingreep die met onze IxS kan zonder ergonomische belasting voor u en uw collega's.



De meest gebruikte toepassing van de IxS is positionering in zijligging waar toegang moet gemaakt worden naar het hart, heup of nieren.

U plaatst het sikkelvormig kussen (IxS-S) onder de oksel of de zij en blaast het op tijdens de ingreep om het chirurgisch doel te bereiken.

